

Grundsätzlich liefern wir standardmäßig das am besten geeignete Konzentrat zur jeweiligen Einbettmasse. Im ein oder anderen Fall können Sie auch auf ein anderes Konzentrat zurückgreifen. Nachfolgend finden Sie alle Einsatzmöglichkeiten beschrieben:

Expansion	niedrig	hoch	höher	am höchsten
Konzentrat → PrimaVest®- ↓ Einbettmasse	Konzentrat Universal (klar)	Konzentrat Universal PLUS (blau)	Konzentrat Spezial (rot)	Konzentrat Spezial PLUS (türkis)
FFM	X			
FFM-Z	X			
PRESS	X			
PRESS-2	X			
PRESS-Universal	X			
DUO	X			X
CLASSIC	X			X
M		X	X	X
OPTIMA	(bedingt)		X	X
SOFT	(bedingt)	(bedingt)	X	X
SOFT-2	(bedingt)	(bedingt)	X	X
SPEED	(bedingt)	X		X
ULTIMA	(bedingt)	(bedingt)	X	X

FFM, FFM-Z, PRESS, PRESS-2, PRESS Universal: *Universal:* wird standardmäßig ausgeliefert

DUO, CLASSIC: *Universal:* für Presskeramik wird standardmäßig ausgeliefert
Spezial PLUS: für Gusstechnik entsprechend der Anwendung

M *Spezial:* mehr Expansion bei Tele, weniger Mikroperlen, wird standardmäßig ausgeliefert
Universal PLUS und *Spezial PLUS:* für alle Anwendungen möglich

OPTIMA *Spezial:* für alle Anwendungen möglich, wird standardmäßig ausgeliefert
Universal: Expansion nur für Goldgüsse ausreichend

SOFT, SOFT-2 *Spezial:* für alle Anwendungen möglich, wird standardmäßig ausgeliefert
Universal PLUS: für alle Anwendungen möglich, etwas geringere Expansion
Universal: Expansion nur für Goldgüsse (Wachmodellationen) ausreichend

SPEED *Spezial PLUS:* für alle Anwendungen (**speziell NEM**) möglich, wird standardmäßig ausgeliefert
Universal PLUS: für alle Anwendungen möglich, etwas geringere Expansion
Universal: Expansion nur für Goldgüsse ausreichend
(für NEM unbedingt *Spezial PLUS* verwenden)

ULTIMA *Spezial:* alle Anwendungen möglich, wird standardmäßig ausgeliefert
Universal PLUS: etwas geringere Expansion, vor allem bei Teleskopkronen in NEM.
Universal: Expansion nur für Goldgüsse ausreichend